


HYBENX

MIKROOBIVASTANE
PÕLETIKUVASTANE
HEMOSTAAATILINE

HYBENX

HybenX® Näidustused

- Lihtsaimast rutiinsest profülaktikast keeruliste protseduurideni
- Hambakatu eemaldamine
- Suuõõne pindade muude infektsioonide ravi
- See hõlbustab kuivatamise ja denatureerimise teel igemetele kogunenud orgaanilise komponendi eemaldamist, jättes patsiendi vähem traumeerituks ja muutes ravi mugavamaks.
- Ühe kasutuskorraga vähendatakse korduva aftoosse stomatiidi valulikke sümptomeid ohutult ja tõhusalt
- Hybenx® toimib abiainena kõikide standardsete hambaravi protseduuride puhul

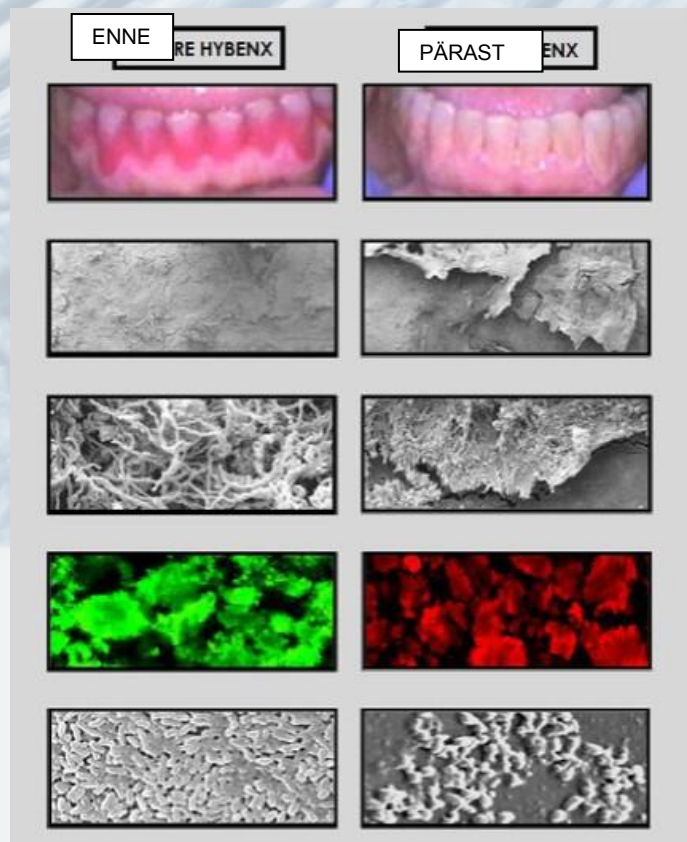

HybenX® Laiendatud teave ja bibliograafia

www.hybenx.it

Exclusive distributor

HAMBASTUUDIO AS
Juhkentali 22-101
10132 Tallinn
Eesti
+37256451249
info@hambastuudio.ee

HYBENX®
Oral Tissue Decontaminant

Elimineerige **BAKTERIAALNE BIOFILM**

HYBENX
Oral Tissue Decontaminant

CE

MIKROOBIVASTANE
PÕLETIKUVASTANE
HAEMOSTAATILINE

HYBENX



BIOFILM

Põletik
Igeme tasku

Biokile on mikroorganismide kile, mis elab hammaste pinnale tugevalt kinnitunud orgaanilises maatriksis (moodustunud vesifaasis polümeeridest ja polüsahhariididest). Biokile moodustub siis, kui vabalt kõikuvad mikroorganismid on pinnale kinnitunud. Kui bakterite rühm akumuleerub pinnale ja saavutab kindla rakutiheduse, algab polüsahhariididest, valkudest ja DNA-st koosnev polümeersete ainete sekretsioon, mis seondub ümbritsevas keskkonnas olevate vabade veemolekulidega, tekitab maatriksi, milles bakterirakud on end tugevalt sisse seadud.

HybenX® pealekandmise aeg

Selle rakendamise parameetrid sõltuvad arsti otsusest (pärast manustamisaja möödumist peske füsioloogilise lahusega ja eemaldage kirurgilise aspiratsiooniga).

Suuhaavandid

10s

Periodontiidi ja perimplantiidi mittekirurgiline ja minimaalselt invasiivne ravi

30s

Endodontia, avatud süvendis implantaadi pinnatöötlus

60s

HybenX® esitletavat tooted

HybenX® on pakendatud blisterpakendisse, milles on kaks 1 ml süstalt, mis on mugavad vedeliku või geeli jaoks. Vedelik on saadaval ka 2 ml viaalis.

HybenX® Liquid syringe

REF 103-2001

Tõhus järgnevate haiguste ennetamisel ja ravimisel

Gingiviit ja parodontiit
Ekstraheerimisjärgsete rakkude saastest puhastamine

HybenX® Gel syringe

REF 103-500

Tõhus järgnevate haiguste ennetamisel ja ravimisel

Mukosiit ja periimplantiit
Implantaadi proteesi hooldus



HybenX® vial

REF 103-1002





Mis on HybenX® ja kuidas see töötab?

HybenX® on poolviskoosne ja läbipaistmatu violetse värviga vedelik paikseks, lokaalseks kasutamiseks suuõõnes. HybenX® sisaldab sulfoonitud fenoolühendeid ja väävelhappe vesilahust. HybenX® on I klassi meditsiiniseade.

HybenX® kasutab oma koostises sisalduva vääveli hügrokoopseid omadusi, et imada Biofilmis sisalduv vesi selle kuivatamise teel kiiresti ja tõhusalt.



Ilma vee olemasoluta sadestuvad orgaanilised polümeerid, mis moodustavad Biofilmi maatriksi selgroo. Kogu Biofilmi struktuur variseb kokku ja eraldub hamba ja kudede pinnast. Hüübinud biokile on kirurgilise aspiratsiooni abil kergesti niisutatav ja eemaldatav.

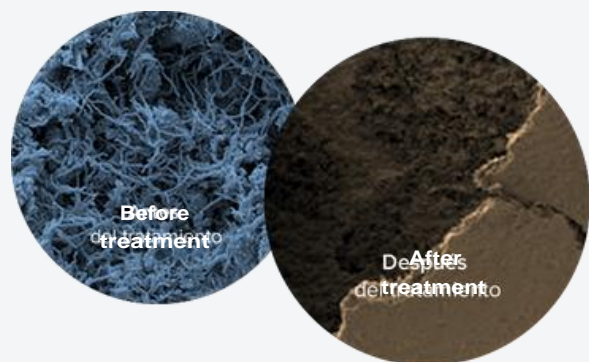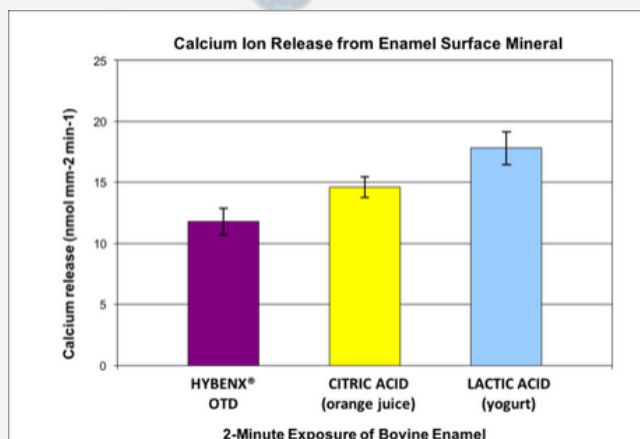

HybenX® omadused

HybenX® omadused on kuivatusaine ja mitte happe omadused. Uuringud on näidanud, et HybenX® põhjustab vähem erosiooni kui apelsinimahla või jogurti ega kahjusta pulpi ega periodontiumi.

HybenX® tooteperekonda on ohutult kasutatud üle 7 miljoni suukaudse rakenduse kogu maailmas..

(Uuring, mis on kohandatud Attin T: Hambaravi erosiooni hindamise meetodite põhjal; Lussi A (toim); Hambaravi erosioon. Monograafia Oral Sci. Basel, Karger, 2006, lk 152–172.)